

## MyDogDNA

<https://mydogdna.com/>

Geenitestipaneeli sisältää yli 270 terveystestiä sekä yli 50 ulkoisten ominaisuuksien testiä (mm. pigmentaatio, karvapeitteen laatu ja morfologia) ja analyysin geneettisestä monimuotoisuudesta. Edullisin MyDogDNA-testipakkaus sisältää myös PRA3- ja CDDY-geenitestit.

Tilaa testipakkaus osoitteesta <https://mydogdna.com/>. Testipakkaus pitää maksaa heti tilauksen yhteydessä.

MyDogDNA:n testipakkaus pitää aktivoida ennen näytteenottoa.

### MyDogDNA-testipakkauksen aktivointi

Rekisteröi tuote profiiliisi pakkauksesta löytyvällä koodilla. Sama koodi löytyy myös kirjekuoresta. Mene osoitteeseen <https://mydogdna.com/>, valitse oikeasta yläkulmasta "Activate" ja seuraa ohjeita. **Aktivoidessasi testipakkausta, tarvitset koiran virallisen nimen, rekisterinumeron ja ehdottomasti sirunumeron.**

*HUOM ! Käyttäessäsi MyDogDNA:ta varmista testikitin aktivoinnin yhteydessä, että **koiran rotu, virallinen nimi, rekisterinumero ja sirunumero on varmasti tallennettu**, jotta ne näkyvät testin valmistumisen jälkeen ladattavassa raportissa (download technical report) ja tulos voidaan yhdistää oikeaan koiraan.*

### Näytteenotto

Suosittellemme odottamaan ennen poskisolunäytettä vähintään kaksi tuntia koiran ruokailun tai herkkupalan jälkeen sekä erillään muista koirista ennen näytteenottoa (vettä saa juoda). Tämä auttaa varmistamaan, että näyte on puhdas.

### Tulokset

Postita tulokset testipakkauksen mukana tulleessa kirjekuoressa. Kirjekuoria tulee testipakkauksen mukana vain yksi. Jos postitat tuloksia useammassa erässä, niiden UPS-postituskustannukset tulee maksaa itse.

Sähköpostiin tulee ilmoitus, kun tulokset ovat valmiit. Tulokset ovat digitaalisia ja saatavilla ainoastaan MyDogDNA:han itse luodulta tililtä. Raporttia ei lähetetä postitse, mutta sähköisen raportin voi ladata ja tulostaa suoraan tililtä.